



LIV[®] Maxi 3 L – En enklare vardag för vårdpersonal

Vardagen i vården handlar mycket om att få tid till patienterna. LIV[®] underlättar din vardag genom att flaskhanteringen är enkel, säker och trygg.

Det är en ny tid nu. Borta är momentet att flytta regulatorn mellan flaskor eller begära hjälp för att göra det. Du sparar tid och får ökad trygghet och säkerhet eftersom du undviker att komma i kontakt med oxygen under högt tryck. Borta är också momentet att behöva funktionskontrollera regulatorn (inspektera för läckage) innan den används.

Flödesväljaren (0 – 25 L/min) som är integrerad i ventilen på flaskan gör det enkelt att komma igång med behandlingen. Det enda som krävs är att du öppnar avstängningsventilen och ställer in aktuellt flöde. Om du behöver ansluta någon annan utrustning gör du det smidigt via snabbkopplingen (4,5 bar utloppstryck).

Med LIV[®] får du också en lättare och mer ergonomisk lösning än tidigare. Jämfört med en traditionell 2,5 L stålflaska av OTC-typ är LIV[®] Maxi 3 L hela 1,5 kilo lättare och rymmer dessutom

100 liter mer oxygen. Den ergonomiska utformningen gör att det finns två bärbarhetsmöjligheter med handtag i ovkant och underkant av skyddskåpan på LIV[®], allt för att flaskan ska vara lätt att lyfta och smidigt att hantera.

Den aktiva tryckmätaren visar alltid aktuellt tryck och via den överskådliga förbrukningstabellen på flaskan vet du alltid hur länge gasen i flaskan räcker. Med den integrerade regulatorn blir flaskbytet enkelt och innehållet kan utnyttjas effektivare.

På varje LIV[®]-flaska sitter en kortinstruktion som beskriver hur du ska gå till väga. Kortinstruktionen är lätt att följa och finns alltid till hands om du behöver den.

LIV[®] innebär också snabbare utbildning eftersom det är färre moment att hålla reda på. Kort och gott: en bekymmersfri vardag för dig som utbildar vårdpersonal på LIV[®]-flaskan.

Innovativ mobil gasterapi – enkelt, lätt och säkert.

