

## LIV® Mini 2 L MEDICINSK OXYGEN AGA. Innovativ mobil gasterapi.



### Enklare och säkrare

Mobil gasterapi har aldrig varit enklare. LIV® (Linde Integrated Valve) är en smidig lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil, regulator, snabbkoppling och flödesväljare (0 – 6 lpm) som gör anslutningen enkel och bekymmersfri.

Utloppstrycket i snabbkopplingen på LIV® Mini 2 liters gasflaska är 4,5 bar. Snabbkopplingen i ventilen ger möjlighet att vid behov koppla in annan utrustning, tex. en flödesväljare (4,5 bar) för neonatal eller patienter som har högre flöden än 6 lpm. Snabbkopplingen självstänger då man tar bort utrustningen.

Lättviktsflaskorna är tillverkade av aluminium med ett skyddande lager av glasfiber. Den låga vikten gör LIV® Mini 2 L enkel att lyfta, bära och hantera. LIV® Mini 2 liters gasflaska för MEDICINSK OXYGEN AGA väger ca 3,8 kg inkl. gas och levereras i HANDYPACK® som rymmer 1-4 flaskor. MEDICINSK OXYGEN AGA är ett registrerat läkemedel och för mer information hänvisas till FASS.

### Underhåll och spårbarhet

Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med elektroniskt chip och etikett på flaskan vilket garanterar full spårbarhet.

### Produkten består av

- Kombinationsventil integrerad med tryckregulator, flödesväljare och snabbkoppling med fast tryck
- Ventilskydd
- 2 liters aluminiumflaska med ett skyddande lager av glasfiber

### Teknisk data

#### Färdig produkt

Flaskstorlek	2,0 liter
Nominellt innehåll	400 liter
Material	Aluminiumflaska / hoop wrap composite
Diameter flaska	ca. 105 mm
Diameter inkl. ventil	ca. 122 mm
Höjd inkl. ventil och skyddskåpa	ca. 498 mm
Vikt inkl. gas	ca. 3,8 kg
Ventil	LIV Miniflow
Max fyllningstryck	200 bar
Utgångstryck	4,5 bar
Garanterat flöde från snabbkoppling	≥ 120 liter per minut vid flasktryck 50-200 bar
Momentanflöde	>200 liter per minut
Användningstemperatur	-20°C till +45°C
Förvarings-/transporttemperatur	-40°C till +65°C
Användaruttag	Slangnippel (6 mm utsida), flödesreglerad Snabbkoppling enligt NORDIC SS 8752430
Flödessteg	0, ¼, ½, ¾, 1, 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 6 liter per minut
Gällande standard	EN ISO 10524-3

---

Varunummer hos Apoteket	03 40 94
Linde Healthcare artikelnummer	112 904
Standard	Integrerade ventiler är medicintekniska produkter, klassificerade enligt direktiv 93/42/EG

---

**Övrigt** Restgasventil, RPV (Residual Pressure Valve)  
Flaskan har plan botten

---

**Vänd dig till oss** Linde Healthcare jobbar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel - de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl euro-peiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att få marknadsföringstillstånd för medicinsk oxygen i Sverige (2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och vi finns representerade i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på [www.linde-healthcare.se](http://www.linde-healthcare.se)