


Instruktion LIV* Mini

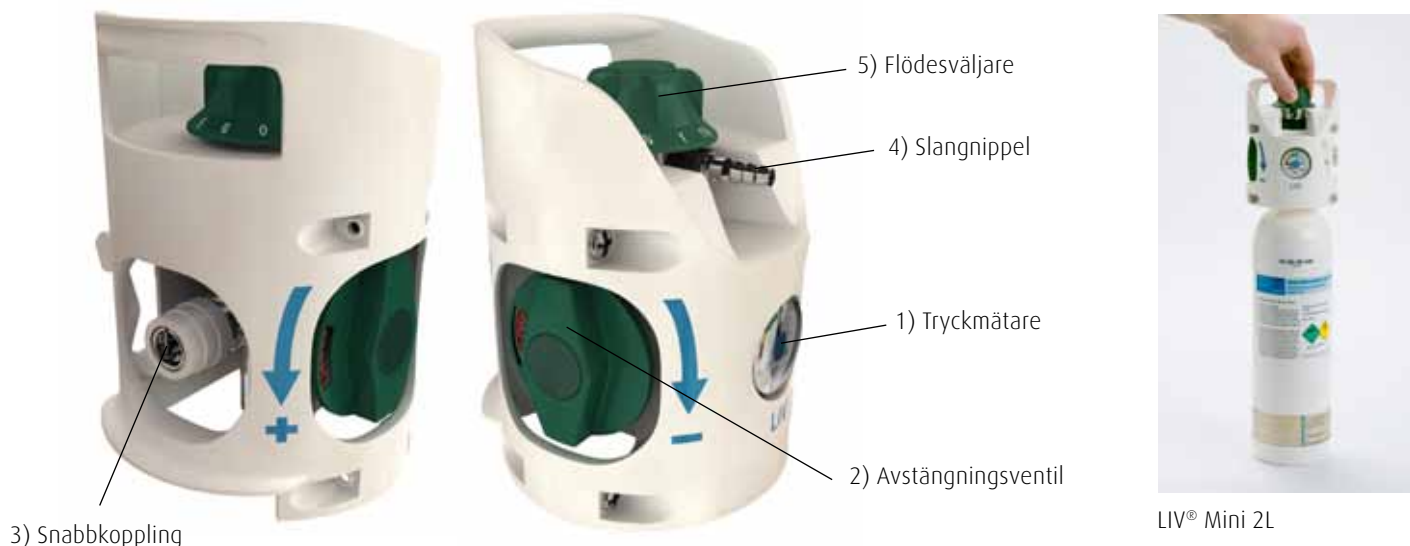

- Före användning:**
- Kontrollera hur mycket oxygen som finns kvar i flaskan genom att läsa innehållet/trycket på tryckmätaren (1).
 - Kontrollera att flödesväljaren (5) är inställd på 0 i position ovanför slangnippeln (4)
 - Se till att inget är anslutet till snabbkopplingen eller slangnippeln (3 och 4)
 - Öppna långsamt avstängningsventilen (2) helt (vrid moturs)
 - Anslut näsgrimpa eller mask till slangnippeln (4) eller annan utrustning till snabbkopplingen (3), t ex en gassparare eller en separat flödesväljare.
 - Välj flöde (5) - endast om utrustning är ansluten till slangnippeln (4)

- Efter användning:**
- Stäng avstängningsventilen (2) (vrid medurs)
 - Koppla bort utrustningen (3 eller 4)
 - Stäng flödesväljaren (5) helt (vrid moturs) och kontrollera att flödesväljaren (5) står på noll i position ovanför slangnippeln (4).


- Övrigt:**
- Arbetstemperatur -20° C till +45° C
 - Utloppstryck i snabbkopplingen är 4,5 bar
 - Används endast tillsammans med utrustning avsedd för denna ventil
 - Förbered byte av gasflaska när tryckmätarens (1) visare går in i det röda området.
 - MRI-KOMPATIBEL
 - Elektrostatiskt fält < 3,0T
 - Ventilen ska befinna sig minst 30 cm från magnetöppningen

Flödessteg LIV Midi: 0, ¼, ½, ¾, 1, 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 6 liter per minut

Snabbkoppling Vid behov kan utrustning anslutas till snabbkopplingen (3), t ex en separat flödesväljare eller en gassparare. Nedan visas exempel för en flödesväljare:


Anslut utrustning

Anslut flödesväljaren genom att trycka flödesväljaren med handkraft i snabbkopplingen. Om det finns en liten pigg på flödesväljaren (se ring nedan) ska den riktas mot skåran i snabbkopplingen. Kontrollera att flödesväljaren sitter fast genom att dra försiktigt i den.

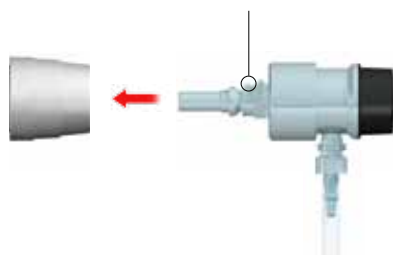

Koppla bort utrustning

Vid avslut av behandling, stäng avstängningsventilen helt. Koppla ur flödesväljaren genom att skjuta tillbaka snabbkopplingen in mot flaskan och ta bort flödesväljaren.

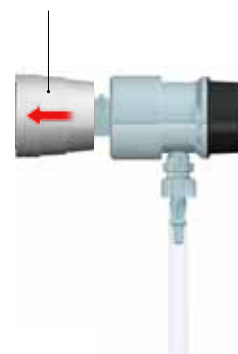

Säkerhet Oxygen

Det är inte farligt att vistas i närheten av oxygen eller att använda oxygen. Beakta dock följande:

MEDICINSK OXYGEN AGA® är endast avsett för medicinskt bruk. Koppla endast flaskan till anslutning avsedd för medicinsk oxygen

- ✓ Rökning och öppen eld är förbjudet i det rum där oxygenbehandling pågår eftersom det ökar risken för brand
- ✓ Varningsskylt ska alltid sitta ca 50 cm från nedkant på insidan av ytterdörren för att informera brandman om brand skulle uppstå
- ✓ Lägg aldrig en oxygenmask eller näsgrimpa direkt på textilier när behandling pågår. Textilier som blivit syrgasmättade kan bli mycket lättantändliga/ brandfarliga. Om detta ändå skulle inträffa, skaka och vädra ur sådana textilier ordentligt
- ✓ Oxygen kan ansamlas i kläder och hår. Därför bör man vädra och skaka ur kläderna, borsta igenom hår/skäggväxt samt vänta 15 minuter innan man använder hårfön, gasspis, grillar, tändar ljus eller på annat sätt använder eld
- ✓ Brödrost, hårfön eller liknande utrustning med glödtråd ska inte användas under pågående oxygenbehandling
- ✓ Låt aldrig olja eller fett komma i kontakt med utrustningen
- ✓ Oxygenflaskor ska förvaras i lättillgängligt och i väl ventilerat rum
- ✓ Oxygenflaskor får inte utsättas för hög värme
- ✓ Utrustning som inte används ska vara avstängd
- ✓ Vid brand – stäng av utrustningen och om möjligt, avlägsna från riskzonen.
- ✓ Håll alltid flaskan ren och torr