

## Kortbruksanvisning OXYSAVER 8

### Sätta på OXYSAVER 8

Tryck och släpp den vänstra knappen märkt 1/0. Att du satt på OXYSAVER 8 bekräftas genom två korta pip.

### Stänga av OXYSAVER 8

Håll den vänstra knappen märkt 1/0 nedtryckt tills du hör ett enkel pip – släpp knappen och OXYSAVER 8 är avstängd.

### Knapplås

När du sätter på din OXYSAVER 8 är knapplåset aktiverat. Det innebär att du inte kan ändra några inställningar.

### Avaktivera knapplåset

Sätt på din OXYSAVER 8 och håll valfri pilknapp (märkt < och >) nedtryckt (c:a 3 sekunder) tills dess att du hör ett pip.

### Ändra flöde

Sätt på din OXYSAVER 8. Lås upp knapplåset. Ställ in ditt flöde med pilarna < och >. Notera att förändring av flödet alltid skall göras i samråd med ansvarig förskrivare.

### Aktivera knapplåset

Knapplåset aktiveras automatiskt 20 sekunder efter det sista knapptrycket.

### Larm

- I displayen står det "Inget oxygen" – Kontrollera innehållet i flaskan alt. att avstängningsventilen är öppen.
- I displayen står det "Kontrollera näsgrimpa" – Sätt på dig näsgrimman och kontrollera att den inte lossnat från OXYSAVER 8.
- I displayen står det "Låg batterispänning" – Byt 9 V batteriet.

### Byte av batteri

Batteriet är ett 9V alkaliskt batteri och är placerat på underdelens långsida. För att komma åt batteriet dras luckan åt sidan.

### Vid leverans är OXYSAVER 8 inställd på

- Flow- MA = Samma flöde oavsett andningsfrekvens
- Trigg.AU = Automatisk triggkänslighet

### Avancerade individuella inställningar

Se "Teknisk handbok och bruksanvisning"

Notera att avancerade individuella inställningar alltid skall göras i samråd med din ansvarige förskrivare.

### Frågor

Har du frågor om hur OXYSAVER 8 fungerar eller hur den ska användas ska du vända dig till din förskrivare.

### Reklamation

Vid reklamation ska du vända dig till ditt apotek.