


MC7741 Nödavstängningslåda DN15. Produktbeskrivning.

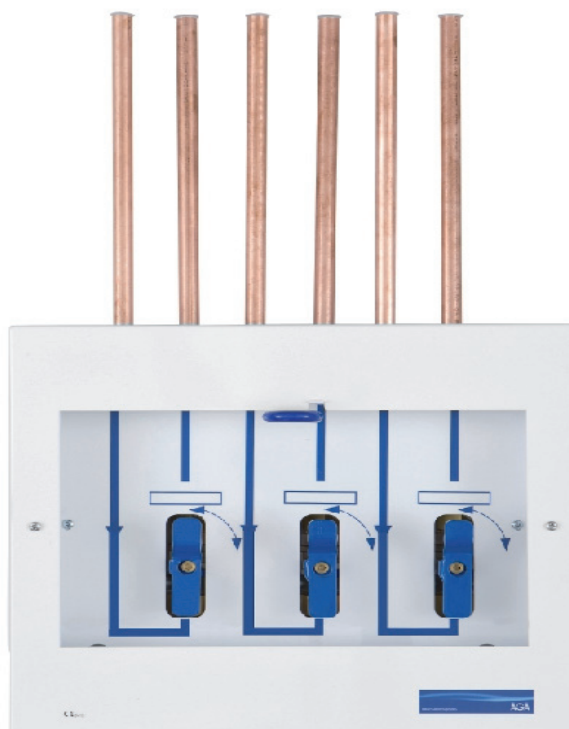

MC7741 Nödavstängningslåda DN15

Av säkerhets- och serviceskäl måste ett centralgassystem vara utrustat med avstängningsventiler placerade så att gastillförseln lätt kan avbrytas. Ventilerna är monterade i en låda. Nödavstängningslådorna skall placeras så att gasen kan stängas av sektionvis. Det innebär att lådorna bör placeras före varje avdelning, operationsenhet, del av avdelning med kritisk vård och enskilda behandlingsrum.

Nödavstängningslådan levereras med anslutningsrör och varje låda är provtryckt och täthetskontrollerad. Nödavstängningslådan har stora ergonomiska vred.

Vid infällt montage passar nödavstängningslådan till vägg med 70 mm regel. Vid 90 mm regel finns extra utrymme bakom för t ex brandisolering (23,5 mm). Alla modellerna, även vid fyra eller fem gaser, passar mellan reglarna i en CC-60 vägg. Lådan är gastät vilket förhindrar gasansamling inne i väggen vid läckage.

MC7741 är CE-märkt enligt ENISO 7396-1 och aktuell SIS HB 370.

Det är viktigt att lådorna placeras lättåtkomligt för behörig personal. Luckan skall förseglas med ett sigill.

För att undvika misstag skall lådorna vara klart och tydligt uppmärkta med gassort. En skylt som visar vilken sektion lådan betjänar skall finnas i dess omedelbara närhet. Ventilerna är i öppet läge då vreden är i vertikal position och bildar linje med den tryckta markeringen på plåten.

Återvinning

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Teknisk data	Max arbetstryck:	16 bar
	Rördimension:	15 mm diameter
	Tryckklass:	PN 16

Artikelnummer Nödavstängningslåda med vändande kopparrör

1 st ventil DN 15	325 397 741
2 st ventiler DN 15	325 397 742
3 st ventiler DN 15	325 397 743
4 st ventiler DN 15	325 397 744
5 st ventiler DN 15	325 397 745

Tillbehör

Ram för utanpåliggande montage till låda för 1-3 ventiler, vändande	325 113 118
Ram för utanpåliggande montage till låda för 4-5 ventiler, vändande	325 113 239

Nödavstängningslåda med genomgående kopparrör

1 st ventil DN 15	325 397 746
2 st ventiler DN 15	325 397 747
3 st ventiler DN 15	325 397 748
4 st ventiler DN 15	325 397 749
5 st ventiler DN 15	325 397 750

Tillbehör

Ram för utanpåliggande montage till låda för 1-3 ventiler, genomgående	325 113 265
Ram för utanpåliggande montage till låda för 4-5 ventiler, genomgående	325 113 266

In order to guarantee a continuous technical development GCE reserve the right to make alterations in design and specification without prior notice.

För att säkerställa kontinuerlig teknisk utveckling, förbehåller sig GCE rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Manufactured by: Produktbeskrivning
GCE Norden AB 700 325 805
Box 21044
SE-200 21 Malmö
Sweden