

## MC7751 Tryckövervakare DN15. Produktbeskrivning.



### MC7751 Tryckövervakare med manometer, larm och reservgaskoppling

Tryckövervakare kan användas på vårdavdelningar där kravet på tryckvaktsfunktion med slavregulator inte är nödvändigt eller tillvarataget på annat sätt. Om det skulle uppstå tryckfall i tillförseln av de medicinska gaserna kan reservgas kopplas in.

Bakom det plomberade plexiglasets finns snabbkopplingar monterade för enkel och snabb inkoppling av reservgas. Tryckövervakaren har samma avstängningsfunktion som en vanlig nödavstängningslåda men hela tiden kan trycket avläsas och kontrolleras via manometern på framsidan av skåpet.

För att vårdavdelningens personal skall bli informerad om eventuellt gasbortfall är tryckövervakaren utrustad med ett av följande tre olika larmsystem; 1 - pressostater som ansluts till gaslarm C44, 2 - tryckgivare som kopplas till tryckövervakningsenheten MC7701 eller 3 -tryckgivare av typen 4-20 mA som kopplas direkt till DUC (Drift Under Central). Alla de tre olika larmsignalerna kan enkelt överföras till den centrala driftsdatorn. Larmsystem 1 är det mest använda.

Tryckövervakaren levereras med 300 mm långa medicinska kopparrör vilket underlättar anslutningen till rörsystemet. Tryckövervakaren är provtryckt och levereras för topp- eller genomgående anslutning. Den har stora ergonomiska vred.

Vid infällt montage passar tryckövervakaren även till vägg med 70 mm regel. Vid 90 mm regel finns extra utrymme (23,5 mm) bakom för t ex brandisolering. Alla modellerna, även vid fyra eller fem gaser, passar mellan reglarna i en CC-60 vägg. Tryckövervakaren är gastät vilket förhindrar gasansamling inne i väggen vid läckage.

**Återvinning** Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

<b>Teknisk data</b>	Max drifttryck	1600 kPa (16 bar) tryckklass PN16
	Rördimensioner in och ut, DN15	15 mm

Tryckövervakare med toppanslutning, DN15 och pressostater	Antal ventiler	Gas	Artikelnummer
	1	Medicinsk oxygen	325 397 751
	2	Medicinsk oxygen, medicinsk luft	325 397 752
	3	Medicinsk oxygen, medicinsk luft, medicinsk lustgas	325 397 753
	4	Medicinsk oxygen, medicinsk luft, medicinsk lustgas, instrumentluft	325 397 754
	5	Medicinsk oxygen, medicinsk luft, medicinsk lustgas, instrumentluft, medicinsk koldioxid	325 397 755

## Tillbehör

Ram för utanpåliggande montage till låda för 1-3 ventiler, toppansluten	325 113 118
Ram för utanpåliggande montage till låda för 4-5 ventiler, toppansluten	325 113 239

Tryckövervakare med genomgående anslutning, DN15 och pressostater	Antal ventiler	Gas	Artikelnummer
	1	Medicinsk oxygen	325 397 756
	2	Medicinsk oxygen, medicinsk luft	325 397 757
	3	Medicinsk oxygen, medicinsk luft, medicinsk lustgas	325 397 758
	4	Medicinsk oxygen, medicinsk luft, medicinsk lustgas, instrumentluft	325 397 759
	5	Medicinsk oxygen, medicinsk luft, medicinsk lustgas, instrumentluft, medicinsk koldioxid	325 397 760

## Tillbehör

Ram för utanpåliggande montage till låda för 1-3 ventiler, genomgående	325 113 265
Ram för utanpåliggande montage till låda för 4-5 ventiler, genomgående	325 113 268

**Övriga modeller** Kontakta Linde Healthcare för information och artikelnummer.

In order to guarantee a continuous technical development GCE reserve the right to make alterations in design and specification without prior notice.

För att säkerställa kontinuerlig teknisk utveckling, förbehåller sig GCE rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Manufactured by:  
GCE Norden AB  
Box 21044  
SE-200 21 Malmö  
Sweden

Produktbeskrivning  
700 325 751