

Spirit 300. Portabel behållare för flytande oxygen.



Produktbeskrivning

SPIRIT 300 är en portabel lättviktsbehållare för flytande oxygen och är bekväm och lättburen. Behållaren har en inbyggd elektronisk gassparare vilken ger en bestämd pulsvolym med gas vid varje andetag och med en inställning motsvarande 1-5 liter/min. Möjlighet finns att ställa in ett kontinuerligt flöde på (CF) 2 liter/min. Vanlig enkel standard vuxen/barn grimma kan användas. Gasspararen utökar användningstiden och drivs med två batterier.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt, vilket garanterar full spårbarhet.

Tekniska data

Volym (vätska)	0,33 liter
Volym (gas)	275 liter
Vikt (fylld)	1,95 kg
Vikt (tom)	1,6 kg
Dimension	Höjd 223 mm/Bredd 152 mm/Djup 114 mm
Normal fyllningstid	1,5 min (varm)
Arbetsstryck	1,4 bar
Normal avkokning (gas)	378 liter/dygn
Maximal användningstid	Inställd på 2 liter/min: 7 timmar vid 20 andetag per minut
Nivåindikator	Fjädersvåg i bärrem
Flödesinställning liter/min	0 1 1,5 2 3 4 5 CF (CF=Kontinuerligt flöde 2 liter/min)
Drivkälla (till inbyggd gassparare)	2 st batterier LR-14, standard alkaliska (ca 500 timmar drifttid)
Larmindikatorer	LED: Grön vid varje andetag. Röd vid batteribyte.
Apotekets varunummer	202 851
Linde Healthcares artikelnummer	605 196
Grimma artikelnummer	306 798
Användningsområde	+70 till -20°C
Klassificeras enligt MDD	93/42/EC, tillägg 2007/47/EC, Appendix II



Det stationära HemLOX®-kärlet innehållande 25 000 liter gas utgör basstation för Spirit 300. Överfyllning sker genom dockning av SPIRIT 300.

AGA Gas AB
 Linde Healthcare, 181 81 Lidingö
 Telefon: +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se