



Inogen Rove® 6. Bärbar oxygenkoncentrator med 6 flödessteg.



Art.nr. 342232
eller 342233

Inkluderat:



Batteri 8-celler
Art.nr. 339815



eller
Batteri 16-celler
Art.nr. 339816



Batteriladdare
Art.nr. 339818



12 V-kabel
Art.nr. 333479



Bärväska med bärrem
Art.nr. 339819

Tillbehör:



Extern batteriladdare
Art.nr. 339817



Ryggsäck
Art.nr. 339820



Kärra
Art.nr. 340157

Produktbeskrivning

Inogen Rove 6 bärbar oxygenkoncentrator för oxygenbehandling i hemmet och på resa. Godkänd för användning ombord på flyg.

Inogen Rove 6 har sex flödessteg, 210–1260 ml/min. och kan laddas via 12 V- alt. 220 V-uttag under drift.

Inogen Rove 6 kräver inget förebyggande underhåll, enbart kontroll och filterbyte mellan patienter.

Teknisk data

Dimensioner (L x B x H)	18 x 8 x 18 cm (H=20,7 cm 8-cellsbatteri och 22,9 cm med 16-cellsbatteri)
Vikt	2,1 kg med 8-cellsbatteri (2,6 kg med 16-cellsbatteri)
Strömförsörjning	Laddare för 100–240 VAC, 50–60 Hz, med transformator, 12 VDC
Ljudnivå	39 dBA på inställning 2
Batteri	6,25 timmar på inställning 1 (batteri 8-celler) 12,75 timmar på inställning 1 (batteri 16-celler)
Laddtid	3 timmar (batteri 8-celler) 6 timmar (batteri 16-celler)
Oxygenkoncentration	90 % (-3 % till +6 %) på alla inställningar
Oxygentillförsel	Avancerad pulsdos, inställning 1–6
Användningsområde	Stationär, bärbar och på resa. FAA godkänd för användning på flygresa.

Bolusvolym per flödesmängd

Flödessteg	Flöde per minut [ml/min]	Andetag per minut [ml ±15 %]						
		10	15	20	25	30	35	40
1	210	21,6	14,2	10,9	8,9	7,4	6,3	5,4
2	420	43,4	29,2	22,1	17,5	14,8	12,8	11,3
3	630	65,7	43,3	32,9	26,7	22,0	18,8	16,6
4	840	85,8	56,7	43,2	35,0	29,3	25,0	21,7
5	1 050	104,5	69,2	52,9	42,9	36,0	30,4	26,5
6	1 260	123,1	82,1	62,4	50,7	42,6	36,7	31,6

Tabellen ovan tar hänsyn till effekten av flödesinställning och andningsfrekvens på dosstorlek vid havsnivå.

Batteritid

Flödessteg	Strömkonsumtion [W] 8-cellsbatteri/16-cellsbatteri	8-cellsbatteri:	16-cellsbatteri:
		14,4 V, 3,2 Ah. [tim:min]	14,4 V, 6,4 Ah. [tim:min]
1	14,6/14,8	6:15	12:45
2	18,7/18,4	5:00	10:15
3	26,9/26,7	3:15	6:30
4	37,8/37,4	2:15	5:15
5	48,5/48,4	1:45	3:30
6	61,5/61,1	1:15	2:30

Batteritiderna baseras på genomsnittliga värden. Tiden kan variera med upp till 10 % beroende på omständigheterna.

Beställningsnummer
Linde Healthcare

Artikelnummer	Beskrivning
342232	Inogen Rove 6 system, komplett med 8-cellsbatteri
342233	Inogen Rove 6 system, komplett med 16-cellsbatteri
339815	Inogen Rove 6 8-cellsbatteri
339816	Inogen Rove 6 16-cellsbatteri
339817	Inogen Rove 6 extern batteriladdare
339818	Inogen Rove 6 AC/DC-laddare
339819	Inogen Rove 6 bärväska
339820	Inogen Rove 6 ryggsäck
340157	Inogen Rove 6 kärra
339821	Inogen Rove 6 partikelfilter, 2 st/frp.
339822	Inogen Rove 6 kolonner
333479	Inogen Rove 6 12 V-laddare
342424	Inogen Rove 6 bruksanvisning

Kundcenter

För att beställa eller för mer information om våra Inogen produkter, vänligen kontakta vårt kundcenter:
Telefon 08-731 18 00
healthcare.se@linde.com

Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se

® Inogen Rove är ett registrerat varumärke som tillhör Inogen Inc., USA. © Copyright 2024, Linde plc.