



Inogen One® G5. Bärbar oxygenkoncentrator med 6 flödessteg.



Art.nr. 339813
eller 339814

Inkluderat:



Batteri 8-celler
Art.nr. 339815



eller Batteri 16-celler
Art.nr. 339816



Batteriladdare
Art.nr. 339818



12 V-kabel
Art.nr. 333479



Bärväska med bärrem
Art.nr. 339819

Tillbehör:



Extern batteriladdare
Art.nr. 339817



Ryggsäck
Art.nr. 339820



Kärra
Art.nr. 340157

Produktbeskrivning

Inogen One G5 bärbar oxygenkoncentrator för oxygenbehandling i hemmet och på resa. Godkänd för användning ombord på flyg.

Inogen One G5 har sex flödessteg, 210–1260 ml/min. och kan laddas via 12 V- alt. 220 V-uttag under drift.

Inogen One G5 kräver inget förebyggande underhåll, enbart kontroll och filterbyte mellan patienter.

Teknisk data

Dimensioner (L x B x H)	18 x 8 x 18 cm (H=20,7 cm 8-cellsbatteri och 22,9 cm med 16-cellsbatteri)
Vikt	2,1 kg med 8-cellsbatteri (2,6 kg med 16-cellsbatteri)
Strömförsörjning	Laddare för 100–240 VAC, 50–60 Hz, med transformator, 12 VDC
Ljudnivå	38 dBA på inställning 2
Batteri	6,5 timmar på inställning 1 (batteri 8-celler) 13 timmar på inställning 1 (batteri 16-celler)
Laddtid	3 timmar (batteri 8-celler) 6 timmar (batteri 16-celler)
Oxygenkoncentration	90 % (-3 % till +6 %) på alla inställningar
Oxygentillförsel	Avancerad pulsdos, inställning 1–6
Användningsområde	Stationär, bärbar och på resa. FAA godkänd för användning på flygresa.

Bolusvolym per flödesmängd

Flödessteg	Flöde per minut [ml/min]	Andetag per minut [ml ±15 %]					
		10	17	25	30	35	40
1	210	21,00	12,40	8,40	7,00	6,00	5,25
2	420	42,00	24,70	16,80	14,00	12,00	10,50
3	630	63,00	37,10	25,20	21,00	18,00	15,75
4	840	84,00	49,40	33,60	28,00	24,00	21,00
5	1 050	105,00	61,80	42,00	35,00	30,00	26,25
6	1 260	126,00	74,10	50,40	42,00	36,00	31,50

Tabellen ovan tar hänsyn till effekten av flödesinställning och andningsfrekvens på dosstorlek vid havsnivå.

Batteritid

Flödessteg	Strömkonsumtion [W] 8-cellsbatteri/16-cellsbatteri	8-cellsbatteri: 2x46,1 Wh, 14,4 V, 3,2 Ah. [tim:min]	16-cellsbatteri: 2x92,2 Wh, 14,4 V, 6,4 Ah. [tim:min]
		1	14,6/14,8
2	18,7/18,4	5:03	10:22
3	26,9/26,7	3:27	7:01
4	37,8/37,4	2:25	4:55
5	48,5/48,4	1:51	3:48
6	61,5/61,1	1:26	2:58

Batteritiderna baseras på genomsnittliga värden. Tiden kan variera med upp till 10 % beroende på omständigheterna.

Beställningsnummer
Linde Healthcare

Artikelnummer	Beskrivning
339813	Inogen One G5 system, komplett med 8-cellsbatteri
339814	Inogen One G5 system, komplett med 16-cellsbatteri
339815	Inogen One G5 8-cellsbatteri
339816	Inogen One G5 16-cellsbatteri
339817	Inogen One G5 extern batteriladdare
339818	Inogen One G5 AC/DC-laddare
339819	Inogen One G5 bärväska
339820	Inogen One G5 ryggsäck
340157	Inogen One G5 kärra
339821	Inogen One G5 partikelfilter, 2 st/frp.
339822	Inogen One G5 kolonner
333479	Inogen One G5 12 V-laddare
339824	Inogen One G5 bruksanvisning

Kundcenter

För att beställa eller för mer information om våra Inogen One produkter, vänligen kontakta vårt kundcenter:
Telefon 08-731 18 00
healthcare.se@linde.com

Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se

® Inogen One är ett registrerat varumärke som tillhör Inogen Inc., USA. © Copyright 2021, Linde plc.