



LIV[®] 5 L AIRAPY[®] – medicinsk luft. En enkel och flexibel lösning för mobil gasterapi.



Enklare och säkrare LIV (Linde Integrated Valve) är en smidig lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil, aktiv manometer, regulator och snabbkoppling som gör anslutningen enkel och bekymmersfri.

Utloppstrycket i snabbkopplingen är 4,5 bar. Snabbkopplingen i ventilen ger möjlighet att vid behov koppla in annan medicinteknisk utrustning, t ex en flödesväljare. Snabbkopplingen självstänger då man tar bort utrustningen.

Lättviktsflaskorna är tillverkade av aluminium. Den låga vikten gör LIV 5 L enkel att lyfta, bära och hantera. LIV 5 L gasflaska för AIRAPY väger ca 9,4 kg inkl. gas och passar i HANDYPACK och PACKBOX. AIRAPY är ett registrerat läkemedel, för mer information se FASS.se.

Aktiv manometer Den aktiva manometern visar hela tiden aktuellt tryck. Du kan därför enkelt se hur mycket gas som finns kvar utan att vrida på avstängningsventilen.

Kompatibel med Maxin LIV 5 L AIRAPY är kompatibel med Maxin nebulisator. Maxin är en högeffekt jetnebulisator med slutet system för deposition av läkemedel i perifera luftvägar. Kännetecknet för Maxin är den korta behandlingstiden och den enkla inhalationen. För mer information om Maxin se www.bluebirdmedical.se.

Underhåll och spårbarhet Vid receptföreskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt med streckkod vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

- Integrerad kombinationsventil med tryckregulator, aktiv manometer och snabbkoppling med fast tryck (4,5 bar)
- Ventilskydd med ergonomiskt bärhandtag
- 5 liters aluminiumflaska, fylld med AIRAPY

Teknisk data

LIV 5 L AIRAPY

Flaskstorlek	5,0 liter
Nominellt innehåll	ca. 980 liter
Material, flaska	Aluminium
Diameter, flaska	ca. 141–143 mm
Diameter, ventil	ca. 122 mm
Höjd inkl. ventil och skyddskåpa	ca. 616 mm
Vikt inkl. gas	ca. 7,7 kg
Ventil	Integrerad ventil med tryckregulator och snabbkoppling
Max fyllningstryck	200 bar
Utloppstryck	4,5 bar
Garanterat flöde från snabbkoppling	≥ 140 liter per minut vid flasktryck 50–200 bar
Momentanflöde	> 180 liter per minut
Användningstemperatur	–20°C till +45°C
Förvarings-/transporttemperatur	–40°C till +65°C
Användaruttag	Snabbkoppling enligt NORDIC SS 8752430
Gällande standard	EN ISO 10524-3
Apotekets varunummer	09 21 91
Linde Healthcare artikelnummer	116948
Standard	CE-märkt. Integrerade ventiler är medicintekniska produkter, klassificerade enligt direktiv 93/42/EG

Övrigt

- MR-kompatibel, ≤ 3,0 T. Ventilen ska befinna sig minst 30 cm från magnetöppningen.
- Restgasventil, RPV (Residual Pressure Valve)
- Flaskan har plan botten

Kontakta oss

Linde Healthcare kundcenter
 healthcare.se@linde.com
 Telefon 08-731 18 00

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se

Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
 Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se