



# Kort instruktion LIV<sup>®</sup>

- Arbetstemperatur -20°C till +45°C.
- Använd endast tillsammans med utrustning avsedd för denna produkt.
- Förbered för flaskbyte när tryckmätarens visare går in i det röda området.
- För att säkerställa korrekt flöde, se till att flödesväljaren står på numrerad flödesinställning, ej mellan två flödesinställningar.

## Före användning:

- Se till att pekaren på tryckmätaren (5) inte är i det röda området.
- Kontrollera att flödesväljaren (3) är inställd på noll.
- Anslut utrustning (1 eller 4).
- Öppna långsamt avstängningsventilen (2) helt (vrid moturs).
- Om utrustning är ansluten till slangnippel (4) välj flöde genom att vrida flödesväljaren (3).

**Patienten kan nu anslutas till utrustning och påbörja behandling.**

## Efter användning:

Vid slutet av behandlingen eller vid utbyte av en tom cylinder:

- Ta bort utrustningen för administrering från patienten.
- Vrid flödesväljaren (3) till noll.
- Stäng avstängningsventilen (2) (vrid medurs).
- Tryckavlasta utrustningen genom att vrida upp flödesväljaren (3) till fullt.
- Vrid flödesväljaren (3) tillbaka till noll.
- Koppla bort utrustningen (1 eller 4).

Magnetkamera-kompatibel, elektrostatiskt fält ≤ 3,0T.

Flytta inte produkten under pågående magnetkameraundersökning eftersom det kan försämrast undersökningsbilden.

Ventilen ska befinna sig minst 30 cm från magnetöppningen