




# LARMINSTRUKTION

## TRÖ CCB-LIGHT MED CENTRALRESERVFÖRSÖRJNING


### 1. Vilken Gas Larmar?

- Tryck på "Reset" för att tysta larmsignalen.
- Kontrollera vilken eller vilka gaser som indikeras av larm (röd lysdiod).

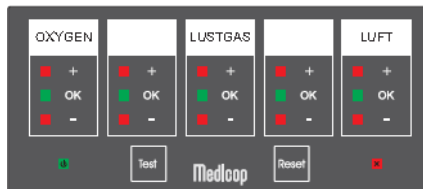

### 2. Låset


- Tryck in låset med handflatan eller som bilden visar knuten hand.
- Fäll upp luckan.

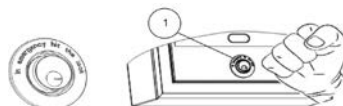


### 3. Stäng avstängningsventilen

- Stäng avstängningsventilen för den inkommande gas som larmet avser, se pos. 1.
- Avstängd ventil se pos. 1.2.



Pos.1

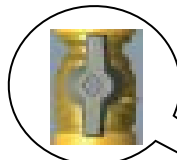

Pos.1.2

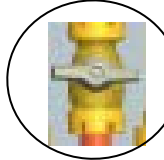

Pos.2

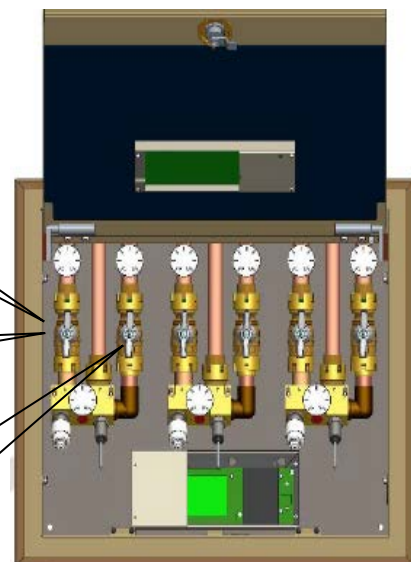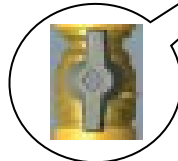


### 4. Öppna avstängningsventilen

- Öppna avstängningsventil för central reservförsörjnings ventil pos.2

### 5. Kontrollera larmet

- Kontrollera att larmet återgår till normalläge (alla lysdioder lyser grönt).
- Kontrollerar att manometrar och LED panel visar rätt tryck enligt anvisningar gällande reservsystem.
- Om larmet inte återgår till normalläge, se punkt 1.

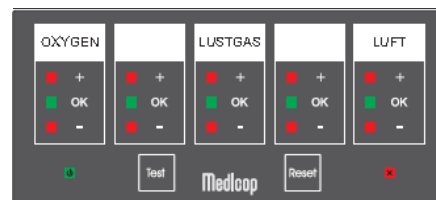

### 6. Underrätta ansvarig personal

- Ansvarig personal kontrollerar utrustningen. Och om så erfordras återställs utrustningen för normaldrift.



Telefonnummer till ansvarig personal: