



12 mars 2020

Till Linde Gas AB:s kunder

Syftet med dokumentet är att förtydliga/aktualisera saneringsrutin för medicinska emballage (gascylindrar & kärl) med anledning av COVID -19.

Hantering av emballage förorenade med eller som misstänks vara förorenade med:

- synlig förorening såsom blod och/eller andra kroppsvätskor
- osynlig förorening såsom virus, inklusive COVID-19

Ett typiskt exempel är emballage som har varit i kontakt med patienter/sjukvårdspersonal med bevisad infektion eller som lagrats/använts i karantänområden.

Förfarande gällande sanering av medicinska emballage:

1. Tvätta emballaget med ljummet kranvatten. Tillsätt inte tvål, klor eller andra rengöringsmedel.
 - Max 50°C
 - Tvätta inte inuti snabbkopplingar eller gasuttag
2. Desinficera emballaget
 - Torka av med IPA (70% isopropylalkohol och 30% vatten)
 - Torka inte inuti snabbkontaktorna eller gasuttagen
3. Torka av packbox (transportbox innehållande flera cylindrar). Stäng och returnera.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Maria Nyberg
Platschef Linde Gas AB Rotebro
076-525 93 55
Maria.Nyberg@linde.com