



# Kort instruktion LIV<sup>®</sup>

- Arbetstemperatur -20 °C till +45 °C.
- Använd endast tillsammans med utrustning avsedd för denna produkt.
- Förbered för flaskbyte när tryckmätarens visare går in i det röda området.

## Före användning:

- Kontrollera gasmängden. Se tryckmätaren (3).
- Anslut utrustning (1).
- Öppna långsamt avstängningsventilen (2) helt (vrid moturs).

Patienten kan nu anslutas till utrustning och påbörja behandling.

## Efter användning:

- Stäng avstängningsventilen (2) (vrid medurs).
- Tryckavlasta genom att släppa ut kvarvarande gas.
- Koppla bort utrustningen (1).

Magnetkamera-kompatibel, elektrostatiskt fält  $\leq 3,0T$ .

Flytta inte produkten under pågående magnetkameraundersökning eftersom det kan försämra undersökningsbilden.

Ventilen ska befinna sig minst 30 cm från magnetöppningen.