



Hortons demand. Sparar gas och ökar säkerheten.



100% oxygen vid inandning

Hortons demand kräver ingen flödesinställning och är en gassparare som ger 100 % oxygen vid inandning. En backventil säkerställer att utandningsluft evakueras och inte går tillbaka i systemet. 100 % oxygen kan därmed andas in med fritt flöde utan att spädas ut med rumsluft där oxygenhalten är förhållandevis låg (ca 21%).

Förlänger användningstiden

Hortons demand minskar oxygenförbrukningen genom att patienten endast får sin gas vid inandning. Med Hortons demand förlängs användningstiden av den utrustning som används.

Mask eller munstycke

Hortons demand med ansiktsmask för vuxen sluter väl över mun och näsa och eliminerar därmed risken av inläckande luft under användning. Då patienten istället önskar använda munstycket bör eventuell inandning via näsan minimeras för att undvika utspädning med rumsluft.

Smidigt startpaket

Hortons demand startpaket levereras i väska med Hortons demand gassparare, 2 st ansiktsmasker, 2 st munstycken, 4 st utandningsventiler, bruksanvisning och varningstriangel. Patienten kan välja att använda ansiktsmask eller munstycke beroende på vad som föredras.

Säkrare användning

Hortons demand ger endast gas vid inandning och tar därför bort risken att gas läcker ut när utrustningen inte används.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptföreskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare tillhandahåller produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Till hempatienter ingår förbrukningsartiklar (ansiktsmask eller munstycke och utandningsventil) som kan beställas hos Linde Healthcares kundcenter. För utandningsventil rekommenderas byte efter 30 dagars användning. Munstycke och mask byts efter behov.

Se användarmanual för fullständig beskrivning.

Produkten är individmärkt, vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

- Gassparare med anslutning för snabbkoppling i gasflaska
- Ansiktsmask och munstycke (patienten kan välja efter preferens)
- Utandningsventil

**Förbrukningsartiklar**

Förbrukningsartiklar ingår i dygnshyran för Hortons demand och finns kostnadsfritt för hempatienter att beställa hos Linde Healthcares kundcenter på tel: 08-731 18 00.

- Ansiktsmask för vuxen, artikelnummer: 329399
- Munstycke, artikelnummer: 329149
- Utandningsventil, artikelnummer: 321588

Teknisk data**Hortons demand**

Anslutning	Gasflaskor med snabbkoppling Centralgasuttag för oxygen (Gasflaskor och centralgasuttag med snabbkoppling för oxygen enligt standard SS875 24 30)
Trigging	Vid varje inandning
Inandningsmotstånd	<0,25 kpa vid 10 L/min
Dosering	Motsvarar inandningen
Mått	Slanglängd 3 m
Vikt	Ca 568 g (inkl. utandningsventil och ansiktsmask)
Arbetstemperatur	+5 °C till +40 °C
Lagringstemperatur	-20 °C till +60 °C
Standard	CE-märkt. Klassificerad enligt direktiv MDD 93/42/EC, Appendix II a.
Apotekets varunummer	22 06 07
Linde Healthcare artikelnummer	113454



Hortons demand med ansiktsmask och LIV® Maxi 10 L.

Kundcenter

Linde Healthcare kundcenter, e-post: healthcare.se@linde.com eller telefon: 08-731 18 00.

Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se