

Making our world more productive



Information om LIV[®] IQ 3 L CONOXIA[®] Uppdaterad programvara.

Den 15 mars uppdateras programvaran för LIV IQ 3 L CONOXIA.

Baserat på våra kunders önskemål om produktförbättringar kommer vi att introducera förändringar och nya funktioner i LIV IQ. Vi har förbättrat funktionaliteten och kommer att uppdatera programvaran i LIV IQ med start den 15 mars. Under en begränsad period kommer du att ha LIV IQ 3 liters gasflaskor med olika programvaruversioner, version 16 (nuvarande version) och version 17 (ny version). LIV IQ gasflaskor med den äldre programvaran kan användas fram till utgångsdatum (se batchetikett) enligt avsedd användning. När LIV IQ gasflaskorna returneras till Linde för påfyllning kommer programvaran att uppdateras.

Detta dokument är information som beskriver förändringarna i prestanda och programvara för LIV IQ 3 L CONOXIA och ersätter inte bruksanvisningen för LIV IQ.



Linde: Living healthcare

Information om ljudsignaler.

Permanent ljudsignal vid lägre innehåll än tidigare i den nya programvaran.

Ljudsignalen i den nya programvaruversionen har förändrats för innehållsstreck 4 och 3. I den nya programvaruversionen är det inte längre en permanent ljudsignal för innehållsstreck 4 och 3 utan ljudsignalen är en kort indikation på att gasflaskans innehåll är på en låg nivå. Ingen åtgärd krävs. Den permanenta ljudsignalen avges vid ett lägre innehåll i den nya programvaran (innehållsstreck 2 och 1).




Varför? Det finns fortfarande medicinsk oxygen kvar i gasflaskan och ett permanent larm för innehållsfält 4 och 3 som kräver åtgärder från användaren är inte nödvändigt utan en kort indikation på att gasflaskan innehåll är på en låg nivå är tillräckligt. Den permanenta ljudsignalen skiljer sig åt mellan de två programvaruversionerna och särskilt under övergångsperioden (med LIV IQ gasflaskor med olika programvaruversioner) bör du vara medveten om detta.

Displayinformation.

LIV IQ gasflaskan indikerar "OFF" i den nya programvaruversionen.

När ventilen är avstängd visas "OFF" på displayen i den nya programvaruversionen.

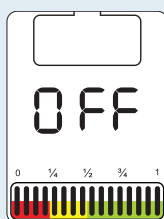


Varför? Nu finns det relevant information om avstängningsventilens status på displayen innan LIV IQ-ventilen öppnas.

Som användare bör du vara medvetna om att "OFF" inte visas på skärmen i den nuvarande programversionen (version 16).

Beräkning av återstående tid

Beräkning av återstående tid har ändrats i den nya programvaruversionen för att bättre återspegla verkligheten – fortfarande med patientsäkerheten i fokus.

Beräkning av återstående tid i den nya programvaruversionen har uppdaterats för att vara närmare verkligheten när gasflaskan är full men garanterar fortfarande patientsäkerhet när innehållet i gasflaskan börjar bli lågt.

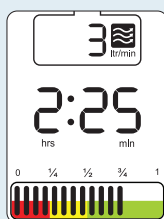

Varför? En försiktig metod med hög säkerhetsmarginal för beräkning av full gasflaska skapade en stor skillnad mellan beräkning av kvarvarande terapitid och verklig tid vid full gasflaska. Detta kan ge en felaktig uppfattning om att det inte finns tillräcklig gasmängd för hela behandlingen.

Som användare bör du vara medveten om att återstående tidsangivelse i de två programvaruversionerna är olika, särskilt när gasflaskan är full.

För fullständig information se bruksanvisningen.

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel 731 10 00, healthcare.se@linde.com, www.linde-healthcare.se

©LIV och CONOXIA är registrerade varumärken som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2021, Linde plc.

