

VENTYO[®] Advantage.

Snabbguide – lustgasmixer.



Denna snabbguide ersätter inte bruksanvisningen.
Läs alla varningar som finns angivna i bruksanvisningen före användning.

Start av behandling

Kontrollera att lustgas- och oxygenslangarna till lustgasmixern är anslutna till respektive gasuttag i panelen/väggen.



1. Vrid OFF/ON-vred (A) till ON
2. Kontrollera att gasindikatorerna (B) är gröna, samt att ljudlarm är tyst
3. Dubbelslangset (art.nr. 336324) (E), med vit och rosa slang (F, G) kopplas fast på dubbelmask (I)
4. Anslut vit slang (F) till GAS OUTPUT (C) på VENTYO Advantage
5. Anslut rosa slang (G) till utsug
6. Anslut utsugsslangen (H) till utlopp på dubbelmask – starta utsug
7. Vrid gasdoseringsvred (D) till önskad dosering (O₂%/N₂O%)
8. Ge dubbelmask (I) till patienten för att påbörja behandling
9. Efter avslutad behandling vrid OFF/ON-vred (A) till OFF

Patienten triggas själv sin tillförsel av smärtlindrande gas, genom att andas i dubbelmasken.
När patienten inte andas i dubbelmasken upphör gasflödet automatiskt.

Rengöring av lustgasmixer mellan patienter

1. Kassera dubbelslangset enligt lokala riktlinjer
2. Torka av lustgasmixer med ytdesinfektion

Felsökning

Avvikelse	Möjlig orsak	Rekommenderad åtgärd
Gasförsörjningsindikatorerna är inte gröna och ljudlarmet är tyst	Gasförsörjningen är inte ansluten	Kontrollera att gasförsörjningsslangarna är korrekt anslutna
	Försörjningstrycket är inte tillräckligt	Kontrollera gasförsörjningen
Gasförsörjningsindikatorn för oxygen blinkar och ljudlarmet låter (frekvens av 90–150 pip/min)	Gasförsörjningen är inte på	Kontrollera gasförsörjningen
	Oxygentrycket är för lågt	Kontrollera att oxygenförsörjningsslangen är monterad korrekt
Gasförsörjningsindikatorn för lustgas blinkar och ljudlarmet låter (frekvens av 45–75 pip/min)	Lustgastrycket är för lågt	Kontrollera gasförsörjningen
		Kontrollera att lustgasförsörjningsslangen är monterad korrekt
Gas flödar fritt i patientslangen	Demandventilen är defekt	Kontrollera gasförsörjningen
		Kontakta teknisk support



Om problem uppstår under behandlingen – som inte kan åtgärdas – måste behandlingen avbrytas.

Vid frågor kontakta vår serviceavdelning:
Linde Healthcare MTS. Tel 08-731 19 62, mts.se@linde.com

Vid beställning av tillbehör kontakta vårt kundcenter:
Tel. 08-731 18 00, healthcare.se@linde.com